




# Doffing Guide

Rimozione di camici e guanti chirurgici contaminati

- A. Iniziare togliendo il primo sopraquanto capovolgendolo.
- B. Ripetere l'azione con il secondo sopraquanto. Smaltire i sopraquanti.
- C. Afferrare il camice per la vita.
- D. Allontanare il camice dal corpo spezzando i lacci. Se il camice é pluriuso - slaccia il camice chirurgico con l'aiuto di un collega.
- E. Toccando solo l'esterno del camice con le mani con il guanto, portare il collo e le maniche del camice in avanti
- F. Tenendo braccia e camice lontani dal corpo, arrotolare il camice e smaltirlo.
- G. Rimuovere il primo sottoguanto dalla zona del polsino indossando ancora l'altro guanto e impacchettarlo in quest'ultimo.
- H. Rimuovere l'ultimo guanto, toccandone solo l'interno.
- I. Smaltire i guanti e disinfettare le mani.

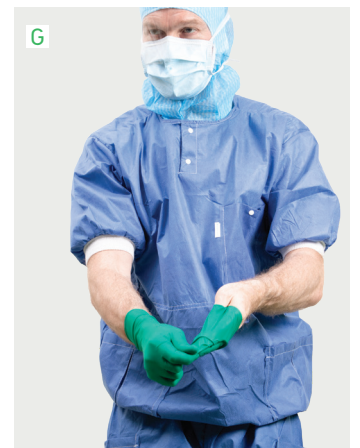

Per saperne di più visita il sito [www.molnlycke.it](http://www.molnlycke.it)

Mölnlycke Health Care, Via Marsala 40/c, 21013 Gallarate - VA Tel. + 39 0331 714011.  
I marchi e i nomi Mölnlycke®, Biogel® e i rispettivi loghi sono registrati a livello globale a nome di una o più Società del Gruppo Mölnlycke Health Care. © 2020. Mölnlycke Health Care AB. Tutti i diritti riservati. ITSU03211912

  
**Mölnlycke®**