

Guide d'autosoins pour changer un pansement

Votre infirmier(-ère) a choisi un pansement Mepilex® Border Flex pour votre plaie

Marche à suivre pour appliquer un pansement Mepilex® Border Flex

1. Lavez-vous les mains à l'eau chaude et au savon pendant 20 secondes.
2. Nettoyez la plaie en suivant les recommandations de votre infirmier(-ère) et séchez soigneusement la peau périlésionnelle.
3. Veillez à ce que le coussin recouvre la peau sèche autour de la plaie au moins sur 1 à 2 cm.

4. Tenez le pansement du côté le plus long et décollez partiellement le feuillet protecteur.



5. Positionnez la partie adhésive du pansement au-dessus de la plaie, puis appliquez-le.



6. Décollez le reste du feuillet protecteur et lissez les bords.



7. Décollez le deuxième feuillet protecteur et lissez tous les bords.




Attention :

- Il se peut que le dos du pansement se décolore, c'est tout à fait normal
- Votre pansement peut rester en place jusqu'à 7 jours en fonction de l'état de la plaie et de la peau périlésionnelle
- Vous pouvez prendre une douche avec votre pansement
- Le pansement Mepilex Border Flex est à usage unique et ne peut pas être réutilisé




La grille de points sur votre pansement vous aide à contrôler le volume d'exsudat absorbé.

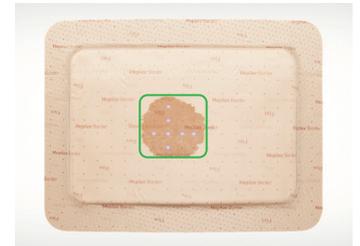

Ex. : 4 x 4 cm. Des liquides commencent à apparaître au dos du pansement.



Ex. : 8 x 10 cm. Les liquides se diffusent à la surface du pansement au fur et à mesure qu'ils sont évacués de la plaie.

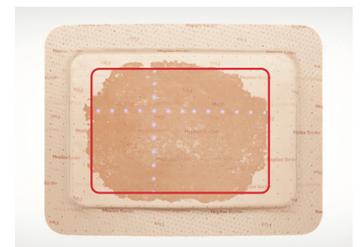

Envisagez de changer votre pansement lorsque les exsudats approchent des bords.

Quand changer votre pansement

Votre infirmier(-ère) vous conseille de changer le pansement :

.....

Pour une aide et des conseils, veuillez contacter votre infirmier(-ère) :

.....

Le pansement Mepilex Border Flex doit être manipulé et changé par un-e professionnel-le de la santé, mais si aucun-e n'est disponible, un-e membre de votre famille ou vous-même pouvez être amené-e à le changer. Le fabricant rejette toute responsabilité en ce qui concerne l'application d'un pansement par ces personnes. Par conséquent, si le pansement Mepilex Border Flex est appliqué par une personne qui n'est pas un-e professionnel-le de la santé, l'utilisateur-riche le fait à ses propres risques et périls.

Pour d'autres informations, rendez-vous sur www.molnlycke.be

Mölnlycke Health Care SA, Berchemstadionstraat 72 boîte 2, 2600 Berchem [Anvers], Belgique. Tél. +32 (0)3 286 89 50.
Les marques, noms et logos Mölnlycke et Mepilex sont déposés par une ou plusieurs sociétés du groupe Mölnlycke Health Care pour le monde entier.
©2020 Mölnlycke Health Care AB. Tous droits réservés. BFWC00012007


Mölnlycke®