

## Bénéfices

- ✓ Soulagement des douleurs et des traumatismes lors du retrait<sup>1,2</sup>
- ✓ Absorbe des quantités modérées à élevées d'exsudat<sup>3</sup>
- ✓ Conception unique adaptée aux plaies sacrées
- ✓ Protection optimisée et scellement au niveau du sillon interfessier
- ✓ Languettes de manipulation pour une plus grande facilité d'application et de retrait

## À titre préventif

Il a été démontré que le pansement Mepilex® Border Sacrum permet de prévenir la survenue d'escarres et répartit les cisaillements et les frictions exercées sur les tissus tout en préservant un microclimat cutané optimal au cours du port<sup>4,5,6</sup>.

### Considérations sur la prévention d'escarres sacrées:

- Evaluer le risque de survenue d'escarre auquel le patient est exposé.
- Appliquer le pansement Mepilex Border Sacrum si le patient est exposé à un tel risque.
- Inspecter la peau sous le pansement chaque jour ou conformément au protocole de l'établissement en soulevant délicatement une partie du bord et en le repositionnant suite à l'inspection.
- Remplacer le pansement conformément au protocole de l'établissement [le pansement doit être remplacé s'il s'enroule sur lui-même, est souillé, saturé, déplacé ou endommagé].

## À titre thérapeutique

Le pansement Mepilex Border Sacrum est conçu pour une large variété de plaies exsudatives, telles que les escarres sacrées. Il peut aussi être utilisé sur des plaies sèches/nécrotiques en combinaison avec des gels.

### Patients atteints d'incontinence fécale ;

- Consulter un médecin; envisager le positionnement d'un dispositif de recueil ou de prise en charge des selles.
- Envisager d'appliquer de la pâte en barrette sur le côté adhésif du pansement là où la mousse et le bord se rencontrent et là où le pansement est au plus près de l'anus.
- Une fois le pansement en position, appliquer une barrière cutanée liquide à l'extérieur du bord Safetac® et sur la peau intacte.

## Informations de commande

### Mepilex® Border Sacrum

Art.-Nr.	Taille	Pharmacode	Pc / boîte	Pc / carton
28 24 50	16 x 20 cm	7367519	5	30
28 20 50	22 x 25 cm	7367502	5	40

Steril - einzeln verpackt

Références: 1. White R, et al. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK, 2005. 2. White R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008;4(1). 3. Barry L. Wound dressing Testing - BS EN 13726-1 Fluid Handling Capacity, Surgical Materials Testing Laboratory, Bridgend, United Kingdom Report No: 10/3299/1 4. Bill B, et al. Wound dressing shear test method (bench) providing results equivalent to humans. For Mölnlycke Healthcare. 5. Black J, et al. Consensus statement: Global evidence based practice recommendations for the use of wound dressings to augment pressure ulcer prevention protocols - August 2012. 6. Call E, et al. Enhancing Pressure Ulcers Prevention Using Wound dressings: What are the modes of action. Int Wound J: doi: 10.1111/iwj.12123.


Découvrez-en plus sur [www.molnlycke.ch/fr-ch](http://www.molnlycke.ch/fr-ch)

Mölnlycke Health Care AG, Brandstrasse 24, 8952 Schlieren, Tel +41 44 744 54 00, Fax +49 211 920 88 170.  
Le nom Mölnlycke Health Care, le logo Safetac et la technologie Deep Defense de même que tous les produits cités sont des marques déposées à l'échelle mondiale d'un ou de plusieurs membres du groupe de sociétés Mölnlycke Health Care.  
©2018 Mölnlycke Health Care. Tous droits réservés.



# Mepilex® Border Sacrum

## Guide d'application du produit

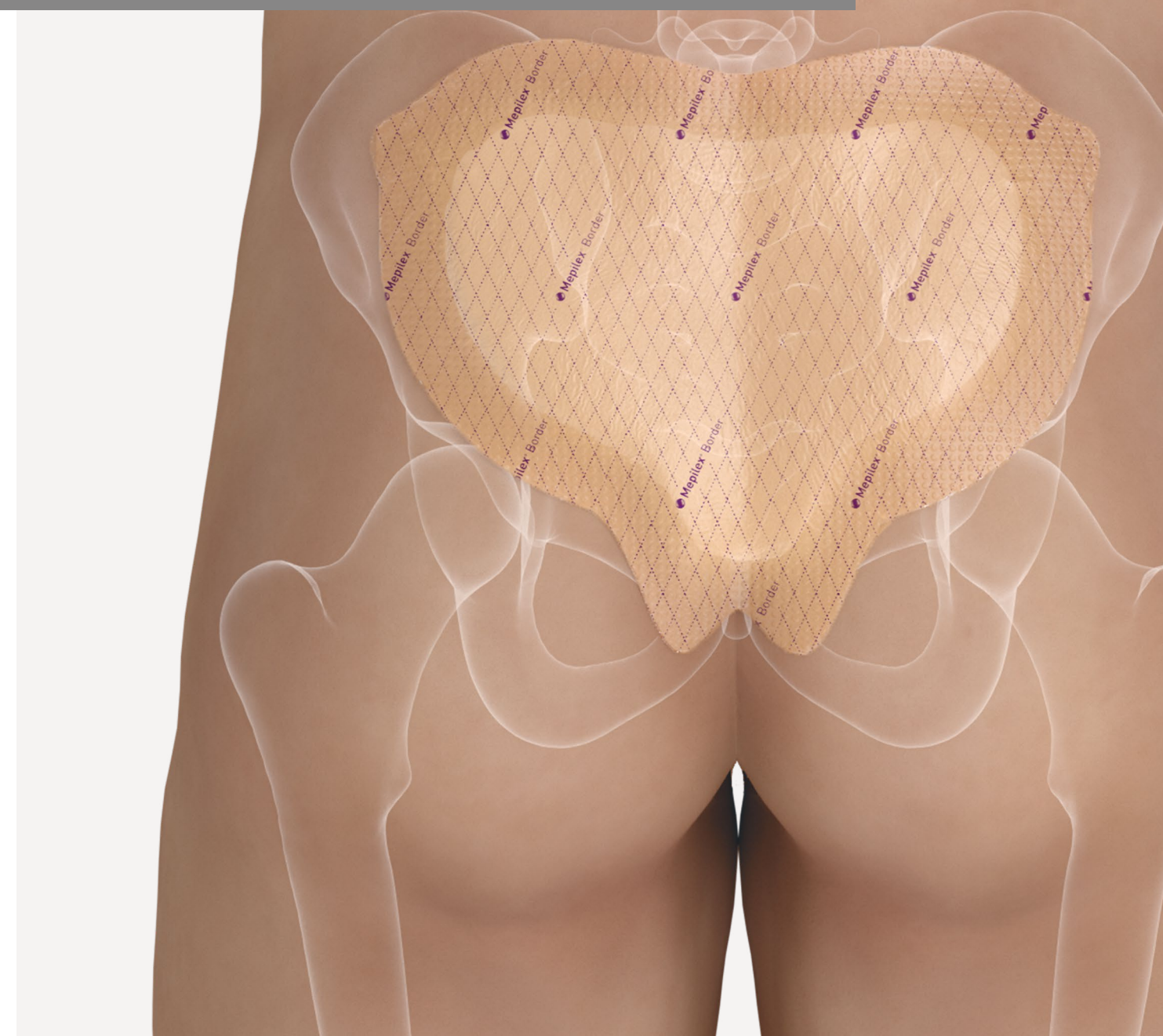


Mepilex® Border Sacrum






## Guide d'application du produit

**Préparer la zone:** nettoyer la peau intacte. Sécher la peau environnante avec soin. S'assurer que la peau est exempte de diméthicone, de restes de film de protection cutanée et d'émollients. L'utilisation d'une barrière cutanée n'est pas nécessaire.

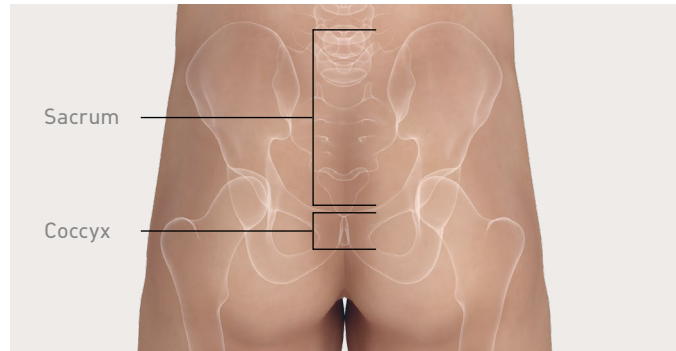

1. Zone à protéger. Evaluer l'anatomie du patient et déterminer le positionnement approprié du pansement.

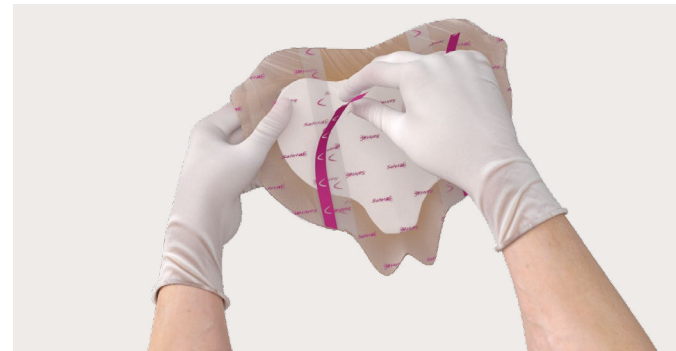

2. Une fois la peau préparée, retirer le film détachable central en tirant délicatement sur la bordure rose.



3. Ecarter les fesses. Appliquer le pansement sur la région sacrée et la partie supérieure du sillon interfessier en veillant à positionner la «base» du pansement sur la région du coccyx.



4. Retirer les films détachables latéraux et lisser délicatement chaque partie.



5. Positionnement du produit.



6. Appuyer et lisser le pansement pour s'assurer que l'ensemble du pansement est en contact avec la peau.



### Ajustement correct:

- Le pansement doit être positionné de telle sorte qu'il convienne à l'anatomie du patient.
- S'assurer que le pansement est bien appliqué sur la peau et éviter toute ride ou poche d'air.

## Guide de réapplication en vue de la prévention des escarres



1. Examiner afin de s'assurer que le pansement est intact et correctement appliqué.



2. Tirer délicatement les languettes de manipulation pour commencer à décoller le pansement de la peau.



3. Continuer à décoller le pansement de la peau en s'aidant des languettes jusqu'à ce que la peau soit exposée et permette un examen cutané.



4. Tout en maintenant le pansement sur le sillon interfessier, réaliser un examen de la peau.



5. Réappliquer la mousse et les bords du pansement.



6. Confirmer que le pansement est remis dans sa position originale et s'assurer que son bord est intact et plat.



7. Appuyer et lisser le pansement pour s'assurer que l'ensemble du pansement est en contact avec la peau.